


CE  
0197

## CVN 4 Responder Bandage

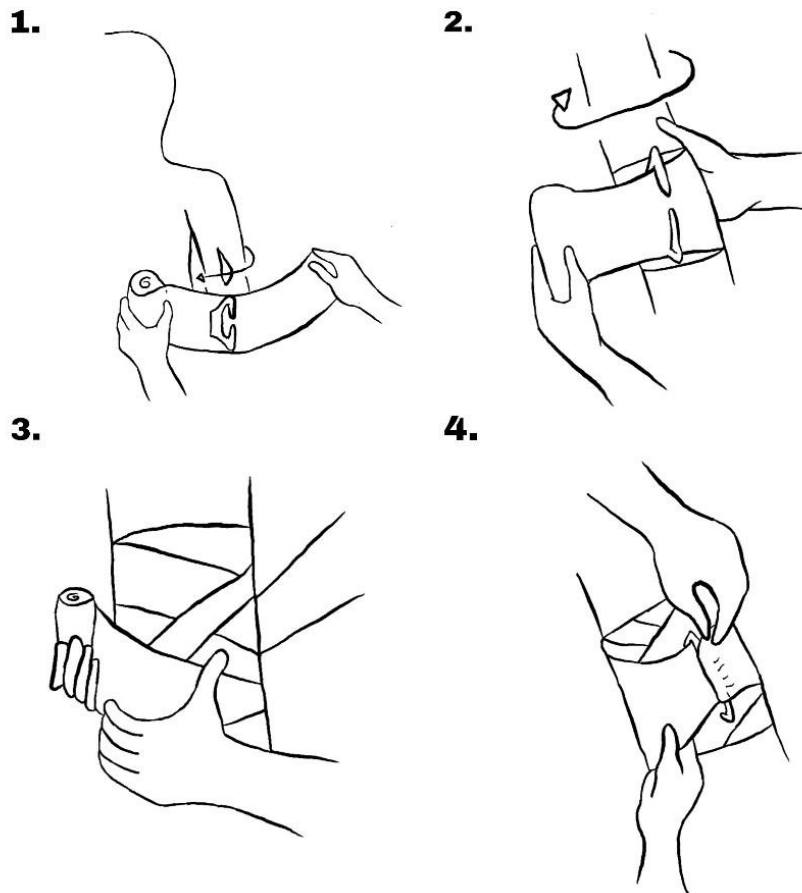

1. Aseta haavatyyny haavaa vasten ja kierrä side ruumiinosan tai raajan ympärille.
2. Vedä side painepalkin läpi ja kiristä.
3. Vedä sidettä lujasti taaksepäin vaihtaen sen kiertosuuntaa
4. Kierrä side tiukasti painepalkin yli ja ruumiinosan ympärille ristisidoksiksi peittäen haavatyynyn jokaisen reunan.
5. Kiinnitä sidos kiinnikkeen päissä olevista koukuista siteeseen.