


CVN Arctic EasyKit – liinavaatesetti

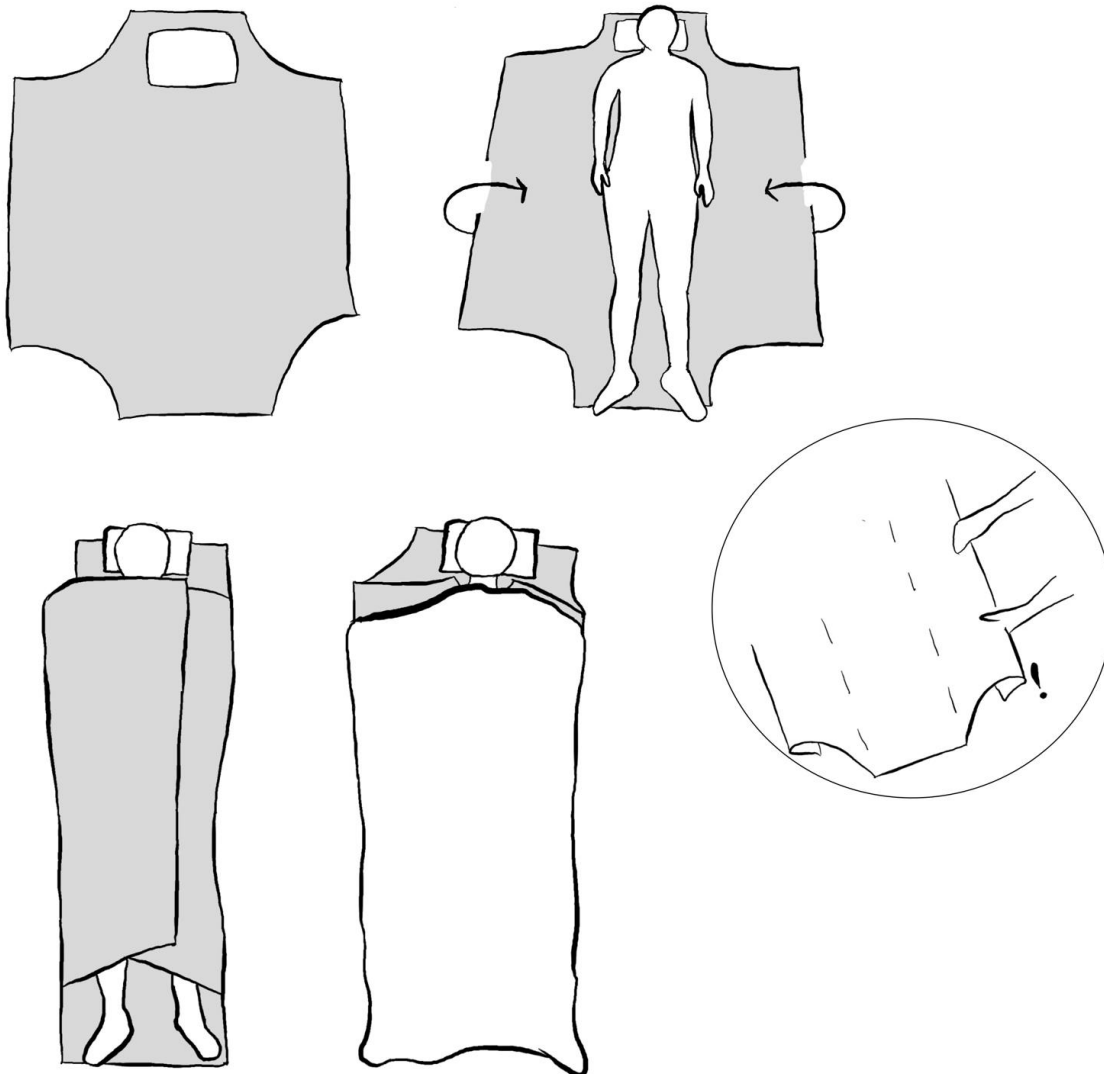

1. Poista tuotteet pakkauksestaan ja levitä lakana sängylle/pareille.
2. Aseta potilas lakanan päälle ja tyyny potilaan pään alle.
3. Lakanan siivekkeet käännetään potilaan päälle ja potilas peitellään fleeehuovalla.
4. Siirtolakanalla nostettaessa: Taita lakanan siivekkeet kaksinkerroin, jolloin lakanasta saadaan pitävä ja kestävä ote.