
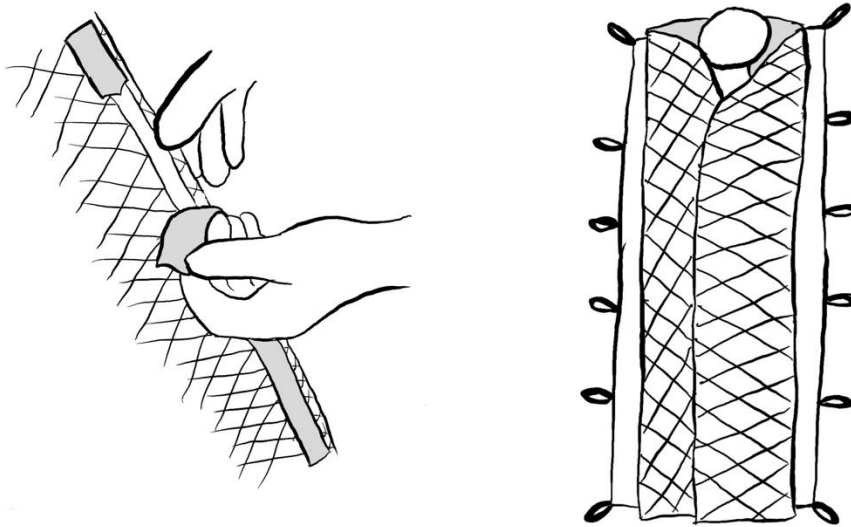


# CVN Arctic Halti Multimover

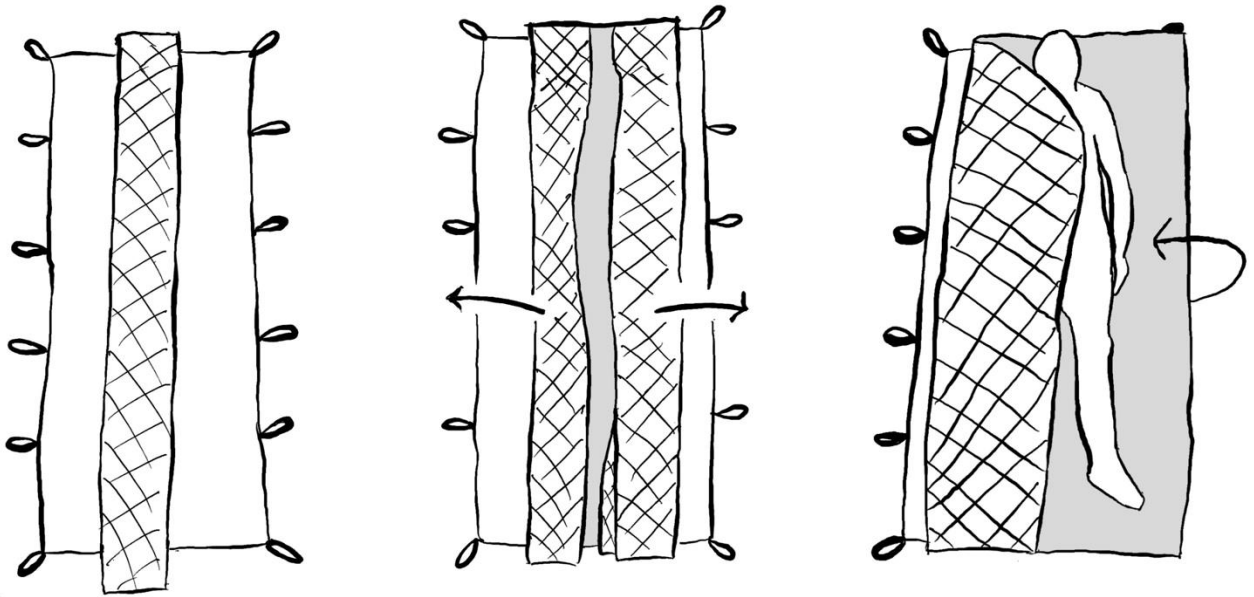

1. Poista tuote pakkauksestaan ja avaa se suoraksi siten, että multimover-osa jää alle ja siihen kiinnitetty Halti blanket päälle.
2. Levitä Halti blanket kokonaan auki ja aseta potilas sen päälle, keskelle pelastuspeitettä.
3. Kiedo pelastuspeite potilaan ympärille siten, että kasvot jäävät näkyviin.
4. Poista peitteen reunassa olevasta liimatarrasta suojarahaperi ja liimaa tarra kiinni pelastuspeitteen ulkopintaan.
5. Potilas voidaan siirtää multimover-osan reunoissa olevista lenkeistä nostamalla.