


CVN Arctic Pallas Hypothermia Bag

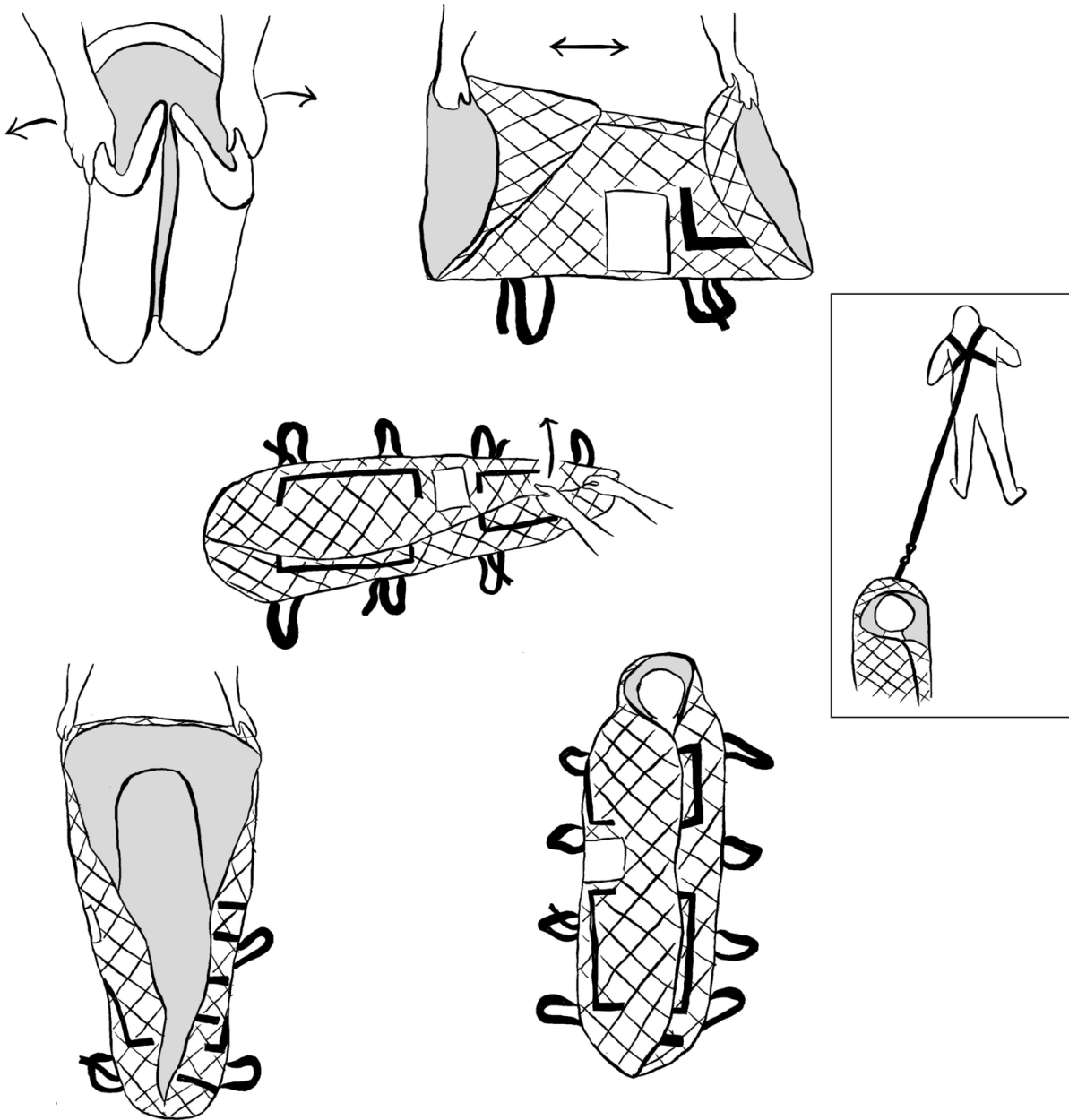

1. Poista tuote pakkauksesta ja suorista se, vahakankainen pohjapuoli alaspäin.
2. Nosta Pallaksen reunat ylös ja aseta potilas pussin sisään. Suljereunat päällekkäin tarrakiinnityksellä. Jätä potilaan kasvot näkyviin.
3. Pussin molemmilla sivuilla on nostolenkit potilaan siirtämistä varten.
4. Pallas-pussin kyljissä on hoitoluukut (tarrakiinnitys) sekä muovitasku.
5. Lisäksi Pallaksen toisessa päässä, potilaan pään puolella on kiinnityslenkki, joka mahdollistaa potilaan vetämisen valjaiden avulla.