


CVN Arctic Saana Multimover

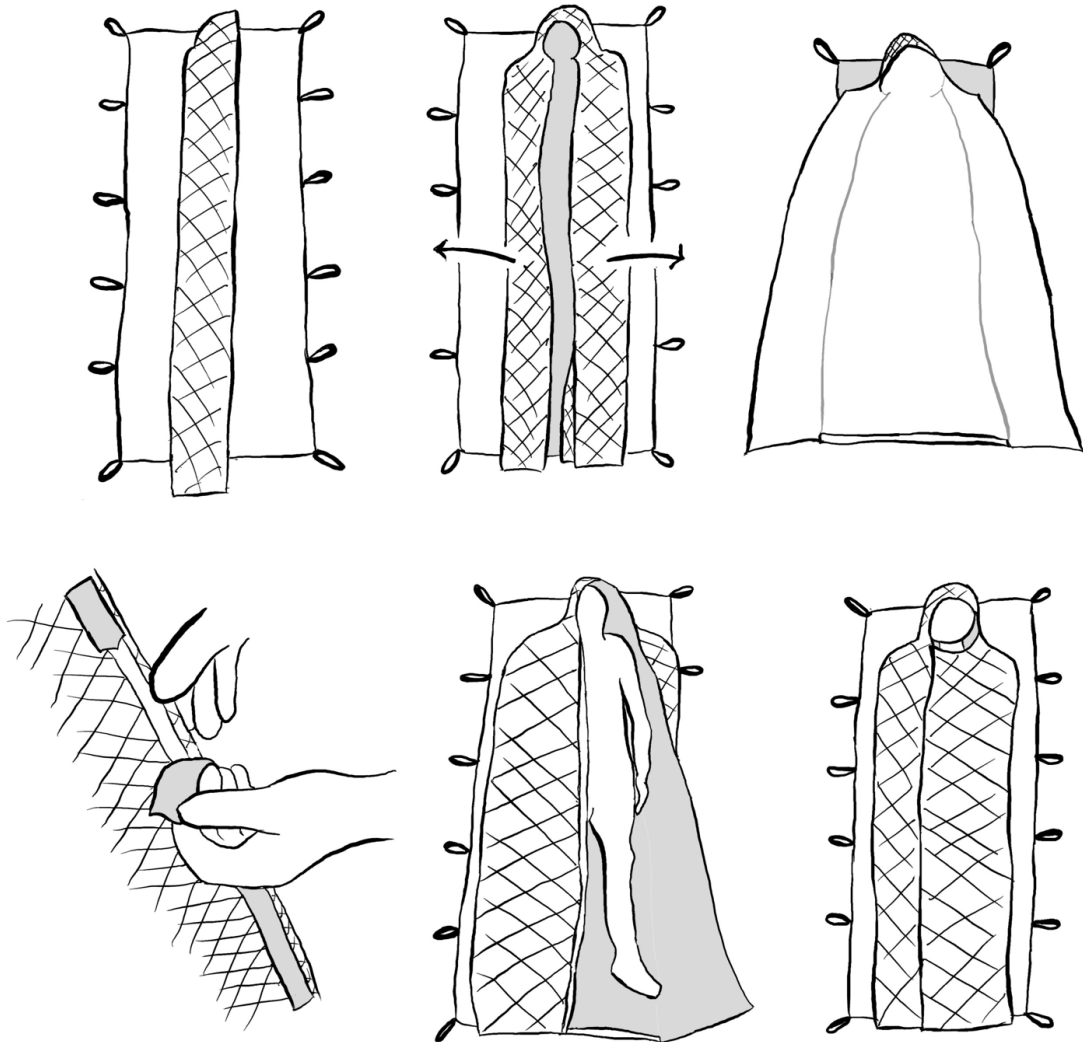

1. Poista tuote pakkauksestaan ja levitä se auki siten, että multimover-osa jää alle ja poncho päällimmäiseksi.
2. Levitä poncho auki.
3. Aseta potilas makuulle ponchon sisään.
4. Poista ponchon reunassa olevasta tarrasta suojapaperi, sulje ponchon reunat ja kiinnitä tarra sen ulkopintaan. Jätä potilaan kasvot näkyviin.
5. Potilas voidaan siirtää multimoverin reunoissa olevista lenkeistä nostamalla.